


スマホアプリの方用 体組成計操作方法

① 画面の測定ボタンを押す

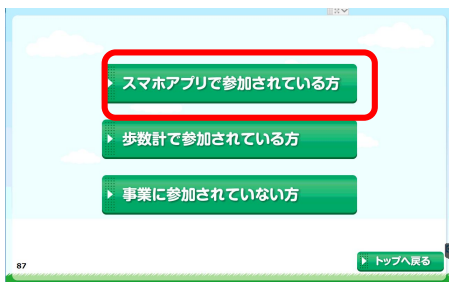

アプリを起動して、ホーム画面
左下「記録する」を押して下記
画面を開いてください

②



QRコードをかざす



③



次へをタッチ


「QRコードを表示する」
を押してください

④



※「まだ、乗らないでください」の
表示があるうちは、まだ乗らない
でください。
音声に従い、靴をはいたまま体
組成計に乗ってください。

⑤

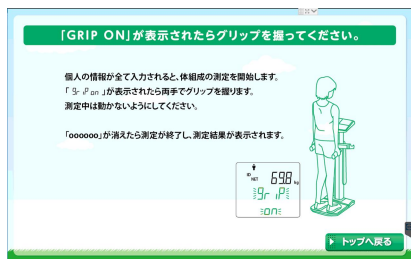

音声に従い、グリップを握って軽く腕
を開いてください。測定終了の音声
が流れたら完了です。


測定結果が印刷されますので、お
持ち帰りください。画面上に、測定
結果が表示されます。必ず「トップ
へ戻る」で最初の画面に戻ってくだ
さい。

スマホアプリの方用 血圧計操作方法

① 画面の測定ボタンを押す



↑最初の画面

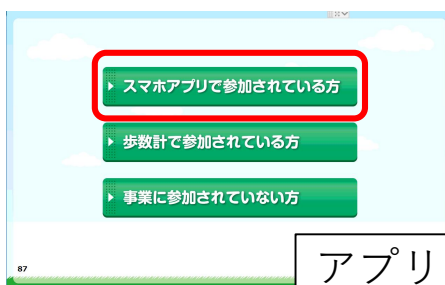

アプリを起動して、ホーム画面
左下「記録する」を押して下記
画面を開いてください

②



QRコードをかざす



「QRコードを表示する」
を押してください

③




次へをタッチ

④



音声に従い、
血圧計に腕を入れ、スタートボタンを
押します。

⑤

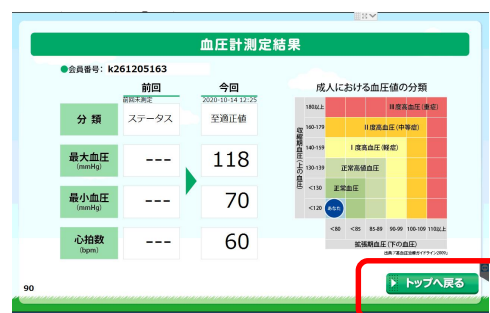

測定結果が表示されます。
測定結果は印字されません。
内容は、記録されています。
「トップへ戻る」で最初の画面に戻します。